

HANDLINGSMÅDE/DRIFTSPRINCIP

Tøj med FIT Therapy-teknologi, der afspejler kroppens Far Infrared Rays (FIR). Disse beklædningsgenstande er lavet af teknisk stretchstof og har en speciel mineralsammensætning (Titanium Dioxide) indlejret i det grafiske print. Denne sammensætning afspejler den fjerneste del af det infrarøde spektrum (mellem 4-21 mikron), kendt som Far Infrared (FIR).
 Ved hjælp af FIT Therapy-teknologi bliver disse bølger delvist reflekteret og reabsorberet af det område, hvor enheden bæres, hvilket forbedrer den overfladiske hudmikrocirkulation.

ANVISNINGER FOR BRUG

FIT Therapy Wear medicinsk udstyr:

- hjælper med at reducere smerter forbundet med muskelskeletlidelser;
- bidrager til at forbedre mikrocirkulationen (perifer cirkulation);
- hjælper til restitutionsprocessen af muskelvæv, der er påvirket af sammentrækningen og styrkeunderskuddet på grund af overbelastning;
- lindrer ubehag i muskler og led relateret til muskeloverbelastning.

Medicinsk udstyr er beregnet til lægbrugere til de brugsindikationer, der er angivet af producenten.

ADVARSEL

Før brug skal du omhyggeligt læse oplysningerne fra producenten.
 Produkterne er non-sterile og indeholder ingen form for medicin.
 Enhederne kan vaskes og genbruges. Det anbefales nøje at følge vaskeanvisningerne.
 Kun til ekstern brug på intakt hud. Må ikke påføres på skadet og/eller irriteret hud.
 Stop behandlingen og fjern apparatet i tilfælde af indtræden af enhver uønsket virkning (udslæt, rødme, kløe, ...) og søg læge.
 Brug ikke apparatet, hvis det viser tegn på tydeligt slid eller unormalt, når emballagen åbnes. den slidte/beskadigede enhed skal udskiftes og bortskaffes i henhold til mærkningsvejledningen.
 Brug ikke produktet, hvis emballagen er åben eller beskadiget.
 Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Udløbsdatoen henviser til produktet i uåbnet emballage og opbevaret korrekt.
 I tilfælde af en alvorlig ulykke skal brugeren indberette hændelsen direkte til fabrikanten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren er etableret.

KONTRAINDIKATIONER

Hvis du lider af specifikke muskel- eller blodcirkulationsproblemer (især relateret til mikrocirkulation), må du ikke bruge produktet uden først at konsultere din læge, da det kan være ineffektivt og/eller føre til en forværring af den patologiske tilstand.
 Det medicinske udstyr er ikke indiceret til personer med kendt overfølsomhed over for udstyrsmaterialer.
 Sammensætningen af hver enhed er skrevet på etiketten, der er syet på produktet.
 Konsultation med en praktiserende læge er påkrævet for brug med pædiatriske patienter og gravide eller ammende kvinder.

OPBEVARING

Opbevares mellem -20°C og +50°C. Holdes væk fra varmekilder.
 For korrekt opbevaring anbefales det kun at opbevare enhederne, når de er helt tørre.

Må ikke bortskaffes i miljøet. Bortskaf enheden i henhold til lokale bortskaffelsesprocedurer.

SYMBOL

 Se brugsanvisningen	 Temperaturbegrænsning	 Undgå sollys	 Brug efter dato	 Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget
 Opbevares tørt	 Medicinsk Udstyr	 Katalognummer	 Batchkode/nummer	 Producent
 30°C mild vask	 Må ikke bleges	 Må ikke tørre tumles	 Må ikke stryges	 Må ikke kemisk renses

BRUG

FIT Therapy Wear er medicinsk udstyr lavet af tekniske, åndbare stoffer med FIT Therapy teknologi. Deres åndbare og elastiske tekniske stof gør dem velegnede til sportsaktiviteter. Enhederne er klar til brug, de kan bæres som almindeligt tøj. Den skiftende brug af to enheder tillader en kontinuerlig terapeutisk effekt. Vask enheden efter køb. Vask enheden i tilfælde af dårlig lugt eller pletter ved omhyggeligt at følge service- og vaskeanvisningerne. Enhederne er tynde og elastiske og kan også bruges over bandager eller fysioterapiapplikationer. Søg råd fra en professionel først.

ANVISNINGER FOR BRUG




T-SHIRT
Til skuldre, ryg, lænd og nakke.
Hjælper med at reducere smerter og forbedre bevægelse forbundet med muskel- og skeletlidelser. Bidrager til forbedring af mikrocirkulationen. Velegnet til sportsaktiviteter. Fastholder ikke sved på grund af dets tekniske stof.



SHORTS
Til lændesmerter, iskias og hofter.
Hjælper med at reducere smerter og forbedre bevægelse forbundet med muskel- og skeletlidelser. Bidrager til forbedring af mikrocirkulationen. Velegnet til sportsaktiviteter.



HANDSKER
Til slidgigt.
De reducerer smerter og forbedrer bevægelse forbundet med muskel- og skeletlidelser. De bidrager til forbedring af mikrocirkulationen (perifer cirkulation).

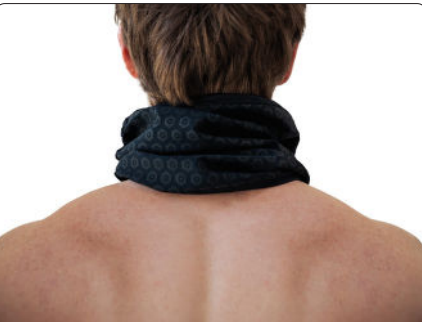

NAKKEVARMER
Til nakkesmerter, stiv nakke og slidgigt.
Hjælper med at reducere smerter og forbedre bevægelse forbundet med muskel- og skeletlidelser. Bidrager til forbedring af mikrocirkulationen. Velegnet til sportsaktiviteter.



KNÆ STØTTE
Til betændelse, bursitis, knæ smerter og slidgigt.
Hjælper med at reducere muskuloskeletale smerter og forbedre mikrocirkulationen. Velegnet til sportsaktiviteter.



ALBUE STØTTE
Til tennisalbue (epicondylitis), slidgigt, betændelse, golfalbue (epitrochleitis).
Hjælper med at reducere muskuloskeletale smerter og forbedre mikrocirkulationen.



FUNKTIONEL STRØMPE
Til senebetændelse og hæl smerter (fasciitis).
Hjælper med at reducere muskuloskeletale smerter og forbedre mikrocirkulationen. Velegnet til sportsaktiviteter.



HÅNDELSBÅND
Til slidgigt og senebetændelse.
Hjælper med at reducere muskuloskeletale smerter og forbedre mikrocirkulationen. Velegnet til sportsaktiviteter.



LÆG STØTTE
Hjælper med funktionel restitution og forbedring af mikrocirkulationen. Velegnet til sportsaktiviteter.